

Übung verbessert die Einsatzbereitschaft.



Das LIFEPAK CR2 AED-Schulungssystem (Trainer) bietet eine realitätsnahe Übungsmöglichkeit für die Verwendung des LIFEPAK CR2 Defibrillators ohne eine wirkliche Ladung und Entladung elektrischer Energie. Der Trainer sieht genauso aus wie der CR2 und simuliert dessen tatsächliche Funktionsweise unter Verwendung der gleichen einfachen Benutzeroberfläche. Voreingestellte Demos können für den vollautomatischen bzw. halbautomatischen Modus programmiert werden, um eine schnelle Präsentation der wichtigsten CR2-Funktionen sowie der Vorteile der cprINSIGHT™-Analysetechnologie zu ermöglichen.

- Dynamisches und vielseitiges Schulungsgerät
- Gleich intuitiver und einfacher Betrieb wie beim LIFEPAK CR2 Defibrillator
- Vollständig individualisierbare Szenarien
- Keine Fernbedienung notwendig
- ClearVoice™-Technologie

Wie das Original

Der Trainer führt die Anwender durch eine simulierte Analyse, Energieabgabe und angeleitete HLW-Intervalle mit HLW-Coaching und sendet sogar automatisch E-Mail-Benachrichtigungen durch den LIFELINKcentral™ AED Program Manager, wenn das Gerät in Betrieb genommen und die Elektroden platziert wurden. Genau wie der CR2 verwendet der Trainer die ClearVoice™-Technologie, die bei der Erkennung von Hintergrundgeräuschen die Lautstärke der Anweisungen anpasst.

Programmierbare Szenarien

Alle Funktionen des Trainers sind programmierbar, um die gesamte Bandbreite von Szenarien zu simulieren, denen Anwender des LIFEPAK CR2 Defibrillators in der Realität ausgesetzt sein können. Der Trainer bietet zwei vollständig konfigurierbare Szenarien, die über den Einrichtungsbildschirm individuell angepasst und für maximale Flexibilität unterwegs aktualisiert werden können.

E-Mail-Benachrichtigungen

Die CR2 Trainer Demo App kann zur Einrichtung von automatischen E-Mail-Benachrichtigungen verwendet werden, alternativ können E-Mail-Benachrichtigungen manuell über Bluetooth® von jedem Windows®, Android®- oder IOS®-Mobilgerät versendet werden. Diese App simuliert die automatischen E-Mail-Benachrichtigungen, die erstellt werden, wenn ein CR2 zusammen mit dem LIFELINKcentral AED Program Manager verwendet wird.

Einfach und bezahlbar

Der Trainer erkennt, wenn auf die QUIK-STEP™-Elektroden Druck ausgeübt wird und läuft automatisch durch das Szenario, ohne dass dafür eine Fernbedienung benötigt wird. Durch eine Pause-Taste am Gerät kann ein laufendes Szenario nach Bedarf angehalten werden. Zudem ist das CR2 AED-Schulungssystem kostengünstig. Es wird mit vier herkömmlichen Typ D Batterien betrieben. Die Elektroden sind preisgünstig, wiederverwendbar und imitieren die schnell zugänglichen, speziellen QUIK-STEP EKG-Defibrillationselektroden, mit denen der LIFEPAK CR2 Defibrillator funktioniert.

Technische Daten

Allgemein

Der Trainer ist für Umgebungen mit geringen Stößen und geringen Belastungen ausgelegt. Er kann in Umgebungen mit kontrollierter Temperatur und vor Nässe geschützt verwendet werden. Außerdem ist er für eine intensive Nutzung und lange Betriebsdauer geeignet.

Physische Merkmale

Höhe: 27,2 cm mit Griff

Breite: 21,8 cm

Tiefe: 8,6 cm

Gewicht: 1,8 kg mit Batterien

BATTERIEN

6 Volt/4 Zellen, Reichweite 3,3–6,6 V DC. Vier nicht wiederaufladbare Alkalibatterien (Typ D). Neue Batterien bieten mindestens 100 Stunden ständige Betriebszeit bei Lautstärke 4.

TASTEN

Sprache, Stromversorgung, Kind-Modus, Schock

DISPLAY

Stromversorgungsanzeige: Aus bei ausgeschaltetem Gerät; Gerät in Betriebs- oder Einrichtungsmodus; Blinkt bei Gerät im Standby-Modus (geschlossener Deckel)

Simulationsoptionen

Gerätetyp: Halb-, Vollautomat

Anzahl der Ereignisse: 1, 2, 3, 4, Wiederholung

Schock Beratung: Ja, Nein

HLW-Metronom: Nur drücken, 30:2

HLW-Zeit: Kurz, 60 s, 120 s, 180 s

cpriNSIGHT-Technologie: Ein, Aus

Keine HLW erkannt: Ein, Aus

Bewegung erkannt: Ein, Aus

Zweisprachig: Ein, Aus

Zweite Sprache: Alle

Atmung kontrollieren: Ein, Aus

Bitte kontaktieren Sie Ihren Physio-Control Gebietsleiter für weitere Informationen oder besuchen Sie unsere Website.



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.** 
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht
The Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
Germany Sales GmbH**
Stresemannallee 4b
D-41460 Neuss
Tel +49 (0)2131 6617 000
Fax +49 (0)2131 6617 251
www.lifepak.de

**Physio-Control
Austria Sales GmbH**
Simmeringer Hauptstraße 24
A-1110 Wien
Tel +43 (0)1 74040 2866
Fax +43 (0)1 74040 2867
www.physio-control.at

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
c/o Intertrust Service (Schweiz) AG
Alpenstraße 15
CH-6304 Zug
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch

 **Physio-Control, Inc.**, 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA